

Инструкция для массажера Medisana HM 840

[Перейти на страницу товара](#) 




+38 (097) 57 37 561
+38 (063) 98 498 44



RU массажер HM 840

Прибор и органы управления

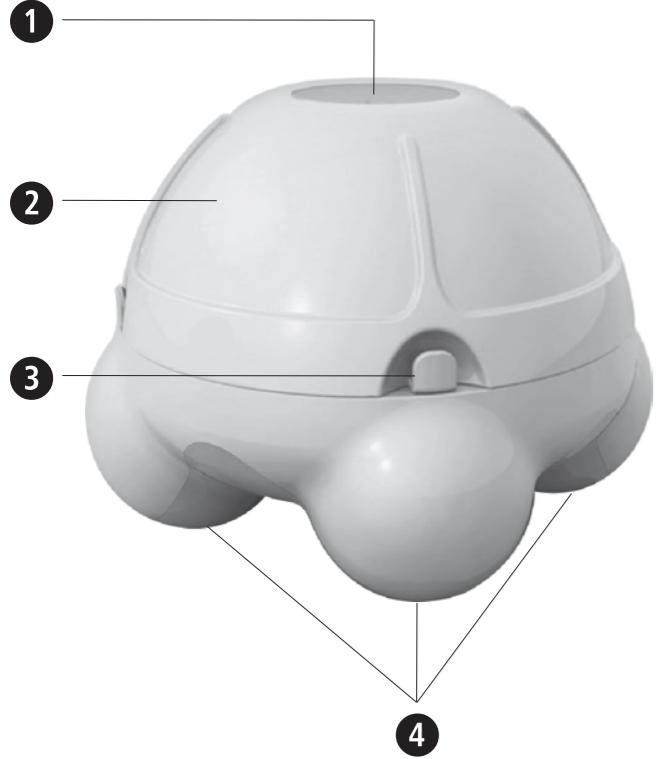

Пояснение символов

ВАЖНО
Несоблюдение инструкции может приводить к тяжелым травмам или повреждению прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание возможных травм пользователя необходимо строго соблюдать эти указания.

ВНИМАНИЕ
Во избежание возможных повреждений прибора необходимо строго соблюдать эти указания.

УКАЗАНИЕ
Эти указания содержат полезную дополнительную информацию о монтаже или работе.

LOT Номер LOT



RU

Указания по безопасности
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ!
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯТЬ!
Прежде, чем начать пользоваться прибором, внимательно прочтите инструкцию по применению, в особенности указания по технике безопасности, и сохраняйте инструкцию по применению для дальнейшего использования. Если Вы передаете аппарат другим лицам, передавайте вместе с ним и эту инструкцию по применению.



- Устройство предназначено только для личного использования. Если у Вас есть сомнения в отношении здоровья, перед применением устройства посоветуйтесь со своим врачом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям. Опасность удушения!

- Что такое массаж?
Если Вы чувствуете боль или Массаж – это один из древнейших получаете неприятные ощущения во методах лечения, который является время массажа, превратив в важной составной частью использования и обратитесь врачу, физиотерапии. Посредством устройства, если Вы страдаете одним из нескольких слоев тканей тела или несколькими из заболеваний или расщепляются напряженные мышцы, расстройств: нарушения местного что улучшает кровоснабжение и кровообращения, варикозное способствует регенерации тканей. расширение вен, открытые раны. Таким образом, массаж может быть ушибы, трещины кожи, воспаление возбуждающим или расслабляющим, вен или тромбоз.
- Кроме того, может устранять осложнение боли. Кроме того, это один фактор – это положительное действие на кровеносные сосуды, больных и беспомощных лиц или в их внутренние органы и на обмен веществ. Различают 5 классических методов массажа: массаж поглаживанием, разминанием, покалыванием и вибрационный массаж, а также растирание/хлопки. Кроме того, существуют такие способы, как рукой, лимфодренаж, массаж рефлекторных зон, подводный душ-массаж, массаж щеткой и пальцевый массаж (шиацу, получили от них лиц или они, по акупрессура).
- Правильный массаж
Это устройство работает на основе вибромассажа. Четыре массажные головки ④ начинают выбирать люффи в сухом и не содержащем пыли месте на нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ ①. Вместе с постоянной температурой.


Можете делать массаж себе или играя прибором.
Преимущества подушечки из люффи

- Люффи – это плетение, получаемое из волокон растений семейства пальм. При этом у Вас есть возможность прикрепить подушечку. При правильном уходе подушечка из люффи прослужит много месяцев. Хронические заболевания и симптомы могут усиливаться.
- Не используйте прибор вблизи глаз или других чувствительных частей тела.
- Слишком длительное использование может привести к перегреву. Через каждые 15 минут использования дайте устройству остыть в течение минимум 15 минут, перед тем как снова им воспользоваться.
- Не используйте устройство, если обнаружены повреждения, если оно работает не безупречно, падало на пол или в воду. Во избежание опасности, отложите устройство на ремонт в сервисный центр.
- Используйте только те комплектующие изделия, которые предназначены для устройства и поставляются производителем вместе с устройством.
- Не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.
- Не просовывайте какие-либо предметы в отверстия устройства. Не используйте устройство вблизи аэрозольных или кислородных источников.
- Если устройство используется несколько человек, каждый должен пользоваться своей собственной подушечкой из люффи. Подушечку можно заказать отдельно в торговой сети.
- Если Вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени, рекомендуется вынуть батареи.

ВНИМАНИЕ!
Следите за тем, чтобы не превышать максимальную длительность работы 15 минут!

- Использование / замена батареи
Для установки / замены батареи поверните съемную верхнюю часть ② против часовой стрелки и снимите ее (рис. 1). Установите 3 новых батареи 1,5 В, AAA (рис. 2). Следите за добиться: Массаж в направлении к правильной полярности (как сердце оказывает расслабляющий эффект, а от сердца – возбуждающий). Потом установите на место съемную верхнюю часть ② и закрутите по ВКЛ/ВЫКЛ ① устройство выключится.

ВНИМАНИЕ!
Удерживайте прибор на зоне массажа, прилагая лишь мягкий контакт! Слишком сильное надавливание может привести к травмированию или нарушить функционирование.

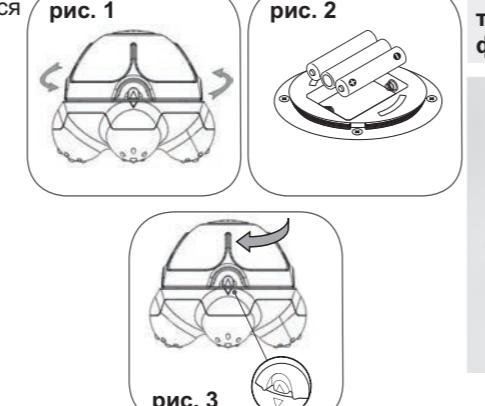

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЩЕНИЮ С БАТАРЕЙКАМИ

- Батареи не разбираются!
- Разряженные батареи немедленно удаляйте из прибора!
- Повышенная опасность вытекания электролита из-за попадания на кожу, слизистые оболочки и в глаза! В случае попадания электролита сразу промойте пострадавшие участки достаточным количеством чистой воды и незамедлительно обратитесь к врачу!

- Если батарея случайно была проглочена, немедленно обратитесь к врачу!
- Всегда заменяйте все батареи одновременно!
- Используйте только батареи одного типа, не комбинируйте батареи различных типов или использованные батареи с новыми!
- Правильно вставляйте батареи, учитывайте полярность!
- Убедитесь, что отсек для батареек плотно закрыт!
- Если прибор долго не используется, удалите из него батареи!
- Не допускайте попадания батареек в руки детей!
- Не заряжайте батареи заново!
- Существует опасность взрыва!
- Не закорачивайте! Существует опасность взрыва!
- Не бросать в огонь! Существует опасность взрыва!
- Не используйте батареи храните в упаковке, не храните их вблизи от металлических предметов, чтобы избежать короткого замыкания!
- Не выкидывайте использованные батареи в бытовой мусор, а только в специальные отходы или в контейнеры для сбора батареек, имеющиеся в магазинах!

- Правильное вставление батареек, учитывайте полярность!
- Убедитесь, что отсек для батареек плотно закрыт!
- Если прибор долго не используется, удалите из него батареи!
- Не допускайте попадания батареек в руки детей!
- Не заряжайте батареи заново!
- Существует опасность взрыва!
- Не закорачивайте! Существует опасность взрыва!
- Не бросать в огонь! Существует опасность взрыва!
- Не используйте батареи храните в упаковке, не храните их вблизи от металлических предметов, чтобы избежать короткого замыкания!
- Не выкидывайте использованные батареи в бытовой мусор, а только в специальные отходы или в контейнеры для сбора батареек, имеющиеся в магазинах!

Правильный массаж
Это устройство работает на основе вибромассажа. Четыре массажные головки ④ начинают выбирать люффи в сухом и не содержащем пыли месте на нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ ①. Вместе с постоянной температурой.

Можете делать массаж себе или

- Люффи – это плетение, получаемое из волокон растений семейства пальм. При этом у Вас есть возможность прикрепить подушечку. При правильном уходе подушечка из люффи прослужит много месяцев. Хронические заболевания и симптомы могут усиливаться.
- Не используйте прибор вблизи глаз или других чувствительных частей тела.
- Слишком длительное использование может привести к перегреву. Через каждые 15 минут использования дайте устройству остыть в течение минимум 15 минут, перед тем как снова им воспользоваться.
- Не используйте устройство, если обнаружены повреждения, если оно работает не безупречно, падало на пол или в воду. Во избежание опасности, отложите устройство на ремонт в сервисный центр.
- Используйте только те комплектующие изделия, которые предназначены для устройства и поставляются производителем вместе с устройством.
- Не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.
- Не просовывайте какие-либо предметы в отверстия устройства. Не используйте устройство вблизи аэрозольных или кислородных источников.
- Если устройство используется несколько человек, каждый должен пользоваться своей собственной подушечкой из люффи. Подушечку можно заказать отдельно в торговой сети.
- Если Вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени, рекомендуется вынуть батареи.

ВНИМАНИЕ!
Следите за тем, чтобы не превышать максимальную длительность работы 15 минут!

Использование / замена батареи

Для установки / замены батареи поверните съемную верхнюю часть ②

против часовой стрелки и снимите ее (рис. 1). Установите 3 новых батареи 1,5 В, AAA (рис. 2). Следите за добиться: Массаж в направлении к правильной полярности (как сердце оказывает расслабляющий эффект, а от сердца – возбуждающий). Потом установите на место съемную верхнюю часть ② и закрутите по ВКЛ/ВЫКЛ ① устройство выключится.

ВНИМАНИЕ!
Удерживайте прибор на зоне массажа, прилагая лишь мягкий контакт! Слишком сильное надавливание может привести к травмированию или нарушить функционирование.

Технические характеристики

Название и модель: **MEDISANA HM 840**

Электропитание: 4,5 В =, 3 x 1,5 В батареи, типа AAA (LR03)

Массажные головки:

Подушечка из люффи:

Условия эксплуатации:

Условия хранения:

Размеры прибл. (Д x Ш x В):

Вес прибл.:

Длительность применения

Рекомендуется делать массаж один-два раза в день приблизительно по 10 - 15 минут. Следует следить за тем, чтобы после каждого использования прибор полностью охладился, прежде чем снова вводить его в работу!

Чистка и уход

Очистка массажера
• Перед очисткой устройства удалите батареи.

• Очищайте устройство мягкой салфеткой, слегка увлажненной мягким мыльным раствором. Ни в коем случае не применяйте острые чистящие предметы или спирт.

• Не размещайте устройство непосредственно под прямыми солнечными лучами, предохраняйте его от попадания грязи и влаги.

• Храните устройство в чистом и сухом месте.

Очистка подушечки из люффи

При надлежащем уходе подушечка из люффи будет служить очень долго. После использования подушечку из люффи следует очистить, чтобы удалить оставшиеся после применения бактерии и частицы кожи. Для этого нужно замочить в растворе теплой воды и уксуса (1 ст. л. столового уксуса на стакан воды – концентрированную уксусную эссенцию следует дополнительно разбавить!). Замочите подушечку в этом растворе на несколько минут, а затем тщательно ополосните. Вы можете также постирать подушечку в стиральной машине при температуре 60°C (не используйте при этом ополаскиватель!) или основательно сполосните горячей водой (без мыла!). После очистки подушечку следует хорошо вымыть, во избежание размножения бактерий во влажной ткани. Для этого вручную вымойте влагу из подушечки и повесьте ее до полного высыхания, лучше всего за пределами влажного помещения (идеальным будет место, куда попадают солнечные лучи). После

заполнения карты

При покупке убедитесь, что фирма-продавец полностью, правильно и четко заполнила гарантийную карту и поставила печать. Сохраняйте ее вместе с чеком покупки в течение всего гарантийного срока.

В случае, если приобретенное Вами изделие марки **MEDISANA** будет нуждаться в ремонте, обратитесь, пожалуйста, в авторизованный сервисный центр **MEDISANA**. При отсутствии в Вашем регионе такого сервисного центра отправьте изделие вместе с описанием неисправности в ближайший сервисный центр. Гарантийный срок изделия указан в инструкции по эксплуатации и исчисляется с даты покупки. При обнаружении производственных дефектов покупателю гарантируется бесплатный ремонт или замена вышедших из строя. Однако фирма оставляет за собой право отказа от бесплатного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках закона "О защите прав потребителей".

Условия гарантии.

1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и четком заполнении гарантийной карты с указанием модели изделия, даты продажи, четкими печатями фирмы-продавца.

Фирма оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийная карта не представлена или если информация в ней неполная, неразборчивая или содержит исправления.

2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных частей и не распространяется на детали отделки, элементы питания и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

3. Доставка изделий в сервисный центр и обратно осуществляется за счет покупателя.

4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если обнаружены:

- наличие механических повреждений

- наличие следов постороннего вмешательства

- ущерб, причиненный потребителем в результате несоблюдения правил эксплуатации

- ущерб в результате попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых

- следы ремонта в неавторизованном сервисном центре

- следы внесения изменений в конструкцию прибора

5. Гарантия распространяется только на приборы, приобретенные на территории Российской Федерации.

Адреса авторизованных сервисных центров **MEDISANA**

©117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.20, корп. 1

Тел.: (495) 729-47-96

арт.:

88520

(зеленый),

88521

(оранжевый)

EAN-номер:

40 15588 88520 4 /

40 15588 88521 1

CE

В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.

MEDISANA AG

Jägerbergstraße 19

41468 NEUSS

<div data-bbox="